

Link do produktu: <https://sklep.rena.rzeszow.pl/obustronny-pas-pachwinowy-pani-teresa-p-1096.html>



Obustronny pas pachwinowy Pani Teresa

Cena	65,39 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	PT 0108
Producent	Pani Teresa

Opis produktu

Obustronny pas pachwinowy Pani Teresa to wyrób medyczny stosowany w przypadku wystąpienia przepukliny pachwinowej. Może być używany przez mężczyzn oraz kobiety.

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- **pas ortopedyczny** służy jako zabezpieczenie pachwin po operacjach rozległych przepuklin pachwinowych
- **pas przepuklinowy** doskonale podtrzymuje niewielkie przepukliny pachwinowe u pacjentów, których nie można operować

PRZECIWWSKAZANIA:

- nie stosować w przypadku przepukliny nieodprowadzalnej

Tabela rozmiarów

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obwód bioder cm	85 - 95	96 - 105	106 - 115	116 - 125	126 - 135	136 - 145

Instrukcja używania:

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru bioder, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

Sposób zakładania:

Zapiąć taśmę główną na wysokość bioder, a następnie zapiąć taśmy kroczone – szerszą część taśmy z przodu dociskając odprowadzoną przepuklinę, węższy koniec taśmy zapiąć z tyłu na rzep. Drugą taśmę zapiąć analogicznie po przeciwnej stronie. Ucisk pasa można regulować taśmą główną i taśmami krocznymi.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie prasować! Nie chlorować!

Uwagi:

Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.

Producent: **Pani Teresa**

Numer katalogowy: **PT0108**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiary produktów Pani Teresa : S , M , L , XL , XXL , XXXL