

Link do produktu: <https://sklep.rena.rzeszow.pl/podkolanowki-uciskowe-magic-ccl1-sigvaris-p-206.html>

Podkolanówki uciskowe MAGIC CCL1 SIGVARIS



Cena	279,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Producent	Sigvaris

Opis produktu

Podkolanówki uciskowe MAGIC CCL 1 18-21 mmHg

Lina Magic Sigvaris to wysokiej jakości gam wyrobów przeciżylakowych zapewniające wygodę i dyskrecję podczas noszenia. **Podkolanówki uciskowe** zostały wykonane z najwyższą starannością o najdrobniejszy detal. Dużą zaletą produktu jest to, że dolna część podkolanówek została wykonana w efekcie push up, co pozytywnie wpływa na wygląd oraz wygodę podczas użytkowania. **Podkolanówki na żylaki** zostały wyposażone w mankiet **Sensinova**, który jest delikatny i gładki i nie powoduje dodatkowego ucisku w czasie noszenia.

Podkolanówki Magic stosowane są w procesie **kompresjoterapii** (Kompresjoterapia to sprawdzony sposób leczenia chorób żylnych. Dobór odpowiedniej klasy ucisku, rozmiaru oraz długość stosowania produktu kompresyjnego powinny być skonsultowane z lekarzem.)



Kto powinien nosić podkolanówki na żylaki ?

- Podkolanówki uciskowe to produkt dedykowany dla osób mających problem z żylakami na nogach oraz obrzękami.
- Mogą być również stosowane przez osoby mające problemy z krążeniem.
- Należy pamiętać, aby dobór odpowiednich produktów przeciżyłakowych skonsultować z lekarzem.



Zalety podkolanówek uciskowych Magic Sigvaris

- Wysoka jakość wykonania.
- Łatwe do zakładania.
- Zapewnia dyskrecję.
- Świetna kolorystyka.

Podkolanówki uciskowe Magic CCL 1 Sigvaris - Przeciwwskazania

- Należy pamiętać, aby dobór odpowiednich podkolanówek skonsultować z lekarzem.
- Schorzenia tętnic obwodowych (zwężenie, niedrożności)
- uczulenie na materiały uciskowe.

-
- Niewydolność serca.

Instrukcja użytkowania i pielęgnacja podkolanówek uciskowych Magic Sigvaris

- Nie prać w pralce, najlepiej ręcznie w temperaturze do 40 stopni Celsjusza.
- Prać najlepiej w płynie do prania wyrobów uciskowych.
- Nie stosować płynów do zmiękczenia.
- Nie prasować
- Nie czyścić chemicznie.
- Nie suszyć w suszarce.

Zakładanie podkolanówek uciskowych

Ostre paznokcie i pierścionki z ostrymi krawędziami mogą uszkodzić produkt. Żeby temu zapobiec, przy zakładaniu i zdejmowaniu produktów uciskowych, wskazane jest używanie gumowych rękawic.

Dobór odpowiedniego rozmiaru

Podkolanówki powinny być dobierane przy kończynach wolnych od brzęku u pacjenta (w pozycji stojącej). Należy pamiętać, aby, ciężar ciała był oparty na kończynie, która jest mierzona. Pamiętajmy żeby zawsze mierzyć dwie kończyny. Pomiaru najlepiej dokonywać rano zaraz po przebudzeniu. Gdy nogi nie są jeszcze napuchnięte.

OBJAŚNIENIA DO TABELI ROZMIARÓW

cB - obwód mierzony nad kostką w najwęższym miejscu

cC - obwód mierzony w łydce, w najszerszym miejscu

cD - obwód mierzony pod kolanem, w najwęższym miejscu

ID - długość mierzona od podłoża do wysokości mierzenia obwodu d po wewnętrznej stronie kończyny.

Pomiarów należy dokonywać rano, zaraz po przebudzeniu, na nogach wolnych od opuchlizny.

[Tabela rozmiarów](#)

Producent: **Sigvaris**

Sklep internetowy Rena gwarantuje zakup podkolanówek przeciwyżłakowych w bardzo atrakcyjnych cenach i szybkim czasem realizacji.

Potrzebujesz fachowej pomocy? Zadzwoń do nas [532-462-001](tel:532-462-001) Odpowiemy na wszystkie twoje pytania i pomożemy wybrać odpowiedni produkt.

Szukasz innych podkolanówek ? Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego sklepu, posiadamy produkty takich producentów jak: [Pani Teresa](#), [Sigvaris](#).

Wszystkie oferowane produkty w naszym sklepie są fabrycznie nowe i mają gwarancję producenta.

Na życzenie klienta wystawiamy **paragon** lub fakturę **Vat**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar produktów Magic Sigvaris: XS , S , M , L , M PLUS , L PLUS

Warianty produktów Magic Sigvari: Zakryte palce

Długość produktów Magic Sigvaris: Średnie , Długie

Kolory produktów Magic Sigvaris: Karmelowy 25 , Czarny 99