

Link do produktu: <https://sklep.rena.rzeszow.pl/podkolanowki-uciskowe-ulcer-x-zestaw-sigvaris-p-235.html>



Podkolanówki uciskowe ULCER-X- zestaw Sigvaris

Cena	214,95 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Sigvaris

Opis produktu

Podkolanówki ULCER-X - zestaw Sigvaris

ULCER-X to podkolanówki przeznaczone do leczenia owrzodzeń żylnych. Zestaw składa się z **podkolanówek typu spodnie** oraz **podkolanówki pojedynczej w drugim stopniu ucisku**. Podkolanówki należy stosować tylko i wyłącznie do terapii uciskowej, gdy pojawią się owrzodzenia żyłne. Są świetną alternatywą dla bandażowania. Dzięki zestawowi **ULCER-X** leczenie żylaków jest dużo łatwiejsze. Zastosowanie najwyższej jakości tkanin sprawia, że możemy je założyć bez obaw bezpośrednio na opatrunek.



Zalety podkolanówek uciskowych ULCER-X

- Wysoka jakość wykonania.
- Łatwe do zakładania oraz zdejmowania.
- Możliwość założenia bezpośrednio na opatrunek.
- Zapewniają wygodę i dyskrecję.

Wskazania do stosowania podkolanówek uciskowych ULCER-X

- Stosować w przypadku owrzodzeń żylnych.
- Leczenie obrzęku limfatycznego.

Przeciwwskazania do niestosowania podkolanówek uciskowych ULCER-X

- Osoby z niewydolnością serca.
- Zapalenie żył.
- Bolesny siniaczy obrzęk.
- Zaawansowana choroba tętnic obwodowych.
- Osoby uczulone na materiał uciskowy.

Skład zestawu ULCER-X

- 1x podkolanówka TRADITIONAL CCL 2 (23-32 mmHg) (odkryte palce)
- 2x opatentowana podkolanówka spodnia (15-20 mmHg) (zakryte palce)

Skład surowcowy

- Poliamid: 70%
- Elastyczności: 30%

Zakładanie podkolanówek uciskowych

Ostre paznokcie i pierścionki z ostrymi krawędziami mogą uszkodzić produkt. Żeby temu zapobiec, przy zakładaniu i zdejmowaniu produktów uciskowych, wskazane jest używanie gumowych rękawic.

Dobór odpowiedniego rozmiaru

Podkolanówki powinny być dobierane przy kończynach wolnych od brzęku u pacjenta (w pozycji stojącej). Należy pamiętać, aby, ciężar ciała był oparty na kończynie, która jest mierzona. Pamiętajmy, żeby zawsze mierzyć dwie kończyny. Pomiaru najlepiej dokonywać rano zaraz po przebudzeniu. Gdy nogi nie są jeszcze napuchnięte.

OBJAŚNIENIA DO TABELI ROZMIARÓW

cB – obwód mierzony nad kostką w najwęższym miejscu

cC – obwód mierzony w łydce, w najszerszym miejscu

cD – obwód mierzony pod kolanem, w najwęższym miejscu

Długość ID mierzona od podłoża do wysokości mierzenia obwodu d po wewnętrznej stronie kończyny.

Pomiarów należy dokonywać rano, zaraz po przebudzeniu, na nogach wolnych od opuchlizny.

[Tabela rozmiarów](#)

Producent: Sigvaris

Sklep internetowy Rena gwarantuje zakup podkolanówek przeciwyżłakowych w bardzo atrakcyjnych cenach i szybkim czasem realizacji.

Potrzebujesz fachowej pomocy? Zadzwoń do nas [532-462-001](tel:532-462-001) Odpowiemy na wszystkie twoje pytania i pomożemy wybrać odpowiedni produkt.

Szukasz innych podkolanówek ? Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego sklepu, posiadamy produkty takich producentów jak: [Pani Teresa](#), [Sigvaris](#).

Wszystkie oferowane produkty w naszym sklepie są fabrycznie nowe i mają gwarancję producenta.

Na życzenie klienta wystawiamy **paragon** lub fakturę **Vat**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor ULCER-X SIGVARIS: Beżowy

Rozmiar ULCER-X SIGVARIS: S , M , L , XL , S PLUS , M PLUS , L PLUS , XL PLUS

Długość ULCER-X SIGVARIS: Krótkie , Długie