

Link do produktu: <https://sklep.rena.rzeszow.pl/ponczocha-pojedyncza-z-przypieciem-do-pasa-cotton-ccl2-sigvaris-p-221.html>



Pończocha pojedyncza z przypięciem do pasa COTTON CCL2 Sigvaris

Cena	185,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Sigvaris

Opis produktu

Pończocha uciskowa z przypięciem do pasa Cotton CCL 2 Sigvaris

Pojedyncza pończocha uciskowa z przypięciem z linii **Cotton** to wysokiej jakości produkt medyczny przeznaczony zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. **Pończocha w drugim stopniu ucisku** została stworzona na bazie nici z domieszką bawełny, dzięki której pończocha świetnie przylega do naszej nogi, tym samym zapewnia wysoki komfort noszenia. Produkt idealnie sprawdzi się podczas codziennego funkcjonowania, zapewniając skuteczną terapię uciskową.



Uciskowa pończocha pojedyncza idealnie sprawdzi się u osób po zabiegach chirurgicznych. Świetnie **dopasowuje się do nogi** zwłaszcza w miejscu stopy. Zastosowanie delikatnego szwu przy palcach znacznie podnosi komfort podczas noszenia. **Pończocha uciskowa** jest świetną alternatywą dla bandaży kompresyjnych.

Wszystkie produkty z linii Cotton produkowane są z najwyższej jakości materiałów. Charakteryzują się dużą wytrzymałością oraz są bardzo miłe w dotyku.



Cechy charakterystyczne pończochy uciskowej z przypięciem do pasa Cotton CCL 2 Sigvaris

- Doskonała terapia uciskowa w ciągu dnia.
- Wysoka jakość wykonania zapewnia doskonały komfort noszenia.
- Pończocha jest bardzo łatwe do zakładania i zdejmowania.
- Odpowiednio dobrany ucisk dba o uzyskanie pożądanego efektu w czasie leczenia.
- Materiał z którego została, wykonana pończocha świetnie przepuszcza powietrze.

Wskazania do stosowania pojedynczej pończochy uciskowej z przypięciem do pasa z linii Cotton

- Żylaki z dużym obrzękiem.
- Żylaki z obrzękiem lub bez obrzęku powstałe w czasie ciąży.

-
- Przewlekła niewydolność żylna.
 - Obrzęki pourazowe.
 - Leczenie zakrzepicy/zatorowości.

Przeciwwskazania bezwzględne do niestosowania pończochy uciskowej z linii Cotton

- Osoby ze schorzeniami tętniczymi
- Osoby z problemami serca.
- Septyczne (zakażone) zapalenie żył
- Siniczny obrzęk bolesny.
- Osoby uczulone na materiał uciskowy.

Skład surowcowy pończochy uciskowej Cotton Sigvaris:

- Poliamid: 52%
- Elastanu: 34%
- Bawełna: 14%

Zakładanie pończoch uciskowych

Ostre paznokcie i pierścionki z ostrymi krawędziami mogą uszkodzić produkt. Żeby temu zapobiec, przy zakładaniu i zdejmowaniu produktów uciskowych, wskazane jest używanie gumowych rękawic.

Dobór odpowiedniego rozmiaru

Pończochy przeciżylakowe powinny być dobierane przy kończynach wolnych od brzęku u pacjenta (w pozycji stojącej). Należy pamiętać, aby, ciężar ciała był oparty na kończynie, która jest mierzona. Pamiętajmy, żeby zawsze mierzyć dwie kończyny. Pomiaru najlepiej dokonywać rano zaraz po przebudzeniu. Gdy nogi nie są jeszcze napuchnięte.

OBJAŚNIENIA DO TABELI ROZMIARÓW

cB - obwód mierzony nad kostką w najwęższym miejscu
cC - obwód mierzony w łydce, w najszerszym miejscu
cD - obwód mierzony pod kolaniem, w najwęższym miejscu
cF - obwód mierzony w połowie uda
cG - obwód uda mierzony 5 cm poniżej kroku
IG - długość mierzona od podłoża do wysokości mierzenia obwodu g po stronie wewnętrznej nogi.

Tabela rozmiarów

Sklep internetowy Rena gwarantuje zakup pończoch przeciżylakowych w bardzo atrakcyjnych cenach i szybkim czasem realizacji.

Potrzebujesz fachowej pomocy? Zadzwoń do nas [532-462-001](tel:532-462-001) Odpowiemy na wszystkie twoje pytania i pomożemy wybrać odpowiedni produkt.

Szukasz innych pończoch ? Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego sklepu, posiadamy produkty takich producentów jak: [Pani Teresa](#), [Sigvaris](#).

Wszystkie oferowane produkty w naszym sklepie są fabrycznie nowe i mają gwarancję producenta.

Na życzenie klienta wystawiamy **paragon** lub fakturę **Vat**.

Producent: Sigvaris

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar COTTON SIGVARIS: XS , S , M , L , XS PLUS , S PLUS , M PLUS , L PLUS

Wariant COTTON SIGVARIS: Odkryte palce

Długość COTTON SIGVARIS: Krótkie , Średnie , Długie

Kolor COTTON SIGVARIS: Naturalny

Strona COTTON SIGVARIS: Lewa , Prawa