

Link do produktu: <https://sklep.rena.rzeszow.pl/ponczochy-medyczne-uciskowe-ccl-1-delicate-pani-teresa-p-251.html>



Pończochy medyczne uciskowe CCL 1 DELICATE Pani Teresa

Cena	72,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	PT 0432
Producent	Pani Teresa

Opis produktu

Damskie pończochy przeciwżylakowe w 1 klasie ucisku CCL1 Delicate Pani Teresa

Samonośne pończochy uciskowe z linii Delicate Pani Teresa to wysokiej jakości bielizna lecznicza dedykowana kobietą, które cierpią na problemy z żylakami. Idealnie sprawdzą się w leczeniu takich schorzeń jak: zatorowość/zakrzepica oraz przewlekła niewydolność żylna, obrzęki.

Pończochy Delicate charakteryzują się eleganckim wyglądem oraz dużą wytrzymałością. Dodatkowym atutem jest to, że tkanina posiada gładki splot, co sprawia, że pończochy są przyjemne w noszeniu.

Damskie pończochy uciskowe Delicate zostały wykonane w nowoczesnej technologii, dzięki temu osiągają świetne rezultaty w leczeniu przewlekłej choroby żylnnej, a dodatkowo posiadają przewiewną i przezroczystą strukturę materiału. Produkt dostępny jest w świetnych kolorach, dwóch wariantach długości oraz z palcami zamkniętymi, oraz otwartymi.



Zalety damskich pończoch na żylaki z linii Delicate CCL 1 Pani Teresa

- Wysoka jakość wykonania.
- Zmienny ucisk o wartości 15-21 mmHg.
- Zapewniają doskonały ucisk przez cały dzień.
- Poprawiają krążenie krwi.
- Przynoszą ulgę ciężkim i zmęczonym nogom.



Wskazania do stosowania pończoch uciskowych Delicate CCL 1 Pani Teresa

- Osoby z lekkim żylakami oraz pajączakami.
- Osoby z przewlekłą niewydolnością żył.
- Po zabiegach chirurgicznych.
- Osoby z obrzękiem limfatycznym.

Przeciwwskazania do niestosowania pończoch uciskowych Delicate CCL 1 Pani Teresa

- Zaawansowana niedrożność żył obwodowych
- Problemy z sercem - niewydolność.
- Zapalenie żył
- Obrzęk siniczny kończyny dolnej
- Duże zaburzenia wrażliwości kończyn
- Zaawansowana neuropatia obwodowa
- Osoby z chorobą cukrzycy.
- Pierwotne, chroniczne zapalenie stawów
- Osoby uczulone na materiał uciskowy

Jak prawidłowo dobrać odpowiedni rozmiar pończoch uciskowych Pani Teresa

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru **pończoch medycznych uciskowych** należy dokonać pomiarów obwodów obu nóg, w pozycji stojącej, w miejscach wskazanych w tabeli, a następnie wybrać rozmiar.

Objaśnienia do tabeli rozmiarów dla pończoch uciskowych Delicate Pani Teresa

AT rajstopy

AG pończochy

AD podkolanówki

K Środkowy punkt krocza

cH obwód bioder

cG obwód mierzony 5 cm poniżej K

cF obwód mierzony w połowie uda

cD obwód mierzony poniżej guzowatości kości piszczelowej

cC obwód mierzony w łydce - w miejscu największego obwodu


cB obwód mierzony w kostce - w miejscu najmniejszego obwodu

Aby dobrać prawidłową długość należy zmierzyć wskazany poniżej odcinek nóg:

dla rajstop i pończoch AG 60 - 70 cm krótkie / AG 71 - 83 cm długie

dla podkolanówek AD 34 - 37 cm krótkie / AD 38 - 44 cm długie

Tabela rozmiarów

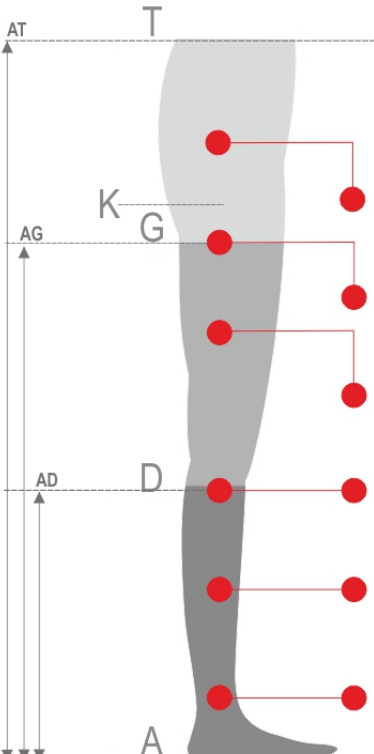

Miejsce pomiaru	S	S [*] PLUS	M	M [*] PLUS	L	L [*] PLUS
cH [*]	<105	106-130	<105	106-130	<105	106-130
cG	43-53		47-58		52-64	
cF	38-48		43-53		50-60	
cD	26-33		30-37		34-41	
cC	29-35		33-39		36-43	
cB	19-21		22-24		25-27	

* Dotyczy rajstop

Producent: Pani Teresa

Produkt jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Deklaracja Zgodności CE wytwórcy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiary produktów Pani Teresa : S , M , L

Kolory produktów Pani Teresa : Czarny , Jasny beż , Beż

Warianty produktów Pani Teresa: Czubek zamknięty

Długość produktów Pani Teresa: Krótkie , Długie