

Link do produktu: <https://sklep.rena.rzeszow.pl/ponczochy-przeciwwylakowe-503-traditional-ccl2-sigvaris-p-233.html>



Pończochy przeciwwylakowe 503 TRADITIONAL CCL2 Sigvaris

Cena	320,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Sigvaris

Opis produktu

Pończochy 503 Traditional CCL 2 Sigvaris

Pończochy przeciwwylakowe w drugiej klasie ucisku to najwyższej jakości wyrób kompresyjny. Zostały stworzone na bazie gumy naturalnej oraz nici, zapewniając doskonałą terapię uciskową.



Pończochy damskie z linii **Traditional** są rozciągliwe oraz miłe w dotyku. Świetnie przepuszczają powietrze, zapewniając komfort i wygodę podczas noszenia. Idealnie sprawdzą się u kobiet mających żylaki z lekkim obrzękiem.



Zalety pończoch przeciwżylakowych 503 Traditional CCL 2 Sigvaris

- Zapewniają doskonały ucisk przez cały dzień.
- Łatwe do zakładania oraz zdejmowania.
- Świetnie przepuszczają powietrze.
- Anatomicznie wyprofilowana pięta.
- Elastyczny, miękki ściągacz.



Wskazania do stosowania pończoch przeciżylakowych 503 Traditional CCL 2

- Żylaki powstałe podczas ciąży.
- Łagodne żylaki z obrzękiem.
- Leczenie zakrzepicy/zatorowości.
- Obrzęk pourazowy.
- Przed operacją.
- Przewlekła niewydolność żył.



Przeciwwskazania do niestosowania pończoch przeciwżylakowych 503 Traditional CCL 2

- Osoby cierpiące na chorobę tętnic obwodowych.
- Problemy z niewydolnością serca.
- Siniczny obrzęk pourazowy kończyny.
- Zapalenie żył.
- Osoby z uczuleniem na materiał uciskowy.

Skład pończoch 503 Traditional CCL 2

- Polyamid - 70%
- Elastadien - 30%

Zakładanie pończoch uciskowych

Ostre paznokcie i pierścionki z ostrymi krawędziami mogą uszkodzić produkt. Żeby temu zapobiec, przy zakładaniu i zdejmowaniu produktów uciskowych, wskazane jest używanie gumowych rękawic.

Dobór odpowiedniego rozmiaru

Pończochy powinny być dobierane przy kończynach wolnych od brzęku u pacjenta (w pozycji stojącej). Należy pamiętać, aby, ciężar ciała był oparty na kończynie, która jest mierzona. Pamiętajmy, żeby zawsze mierzyć dwie kończyny. Pomiaru najlepiej dokonywać rano zaraz po przebudzeniu. Gdy nogi nie są jeszcze napuchnięte.

OBJAŚNIENIA DO TABELI ROZMIARÓW

cB - obwód mierzony nad kostką w najwęższym miejscu
cC - obwód mierzony w łydce, w najszerszym miejscu
cD - obwód mierzony pod kolanem, w najwęższym miejscu
cF - obwód mierzony w połowie uda
cG - obwód uda mierzony 5 cm poniżej kroku
lG - długość mierzona od podłoża do wysokości mierzenia obwodu g po wewnętrznej stronie kończyny.
Pomiarów należy dokonywać rano, zaraz po przebudzeniu, na nogach wolnych od opuchlizny.

[Tabela rozmiarów](#)

Producent: Sigvaris

Sklep internetowy Rena gwarantuje zakup pończoch przeciżylakowych w bardzo atrakcyjnych cenach i szybkim czasem realizacji.

Potrzebujesz fachowej pomocy? Zadzwoń do nas [532-462-001](tel:532-462-001) Odpowiemy na wszystkie twoje pytania i pomożemy wybrać odpowiedni produkt.

Szukasz innych podkolanówek ? Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego sklepu, posiadamy produkty takich producentów jak: [Pani Teresa](#), [Sigvaris](#).

Wszystkie oferowane produkty w naszym sklepie są fabrycznie nowe i mają gwarancję producenta.

Na życzenie klienta wystawiamy **paragon** lub fakturę **Vat**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiary TRADITIONAL SIGVARIS: S , M , L , S PLUS , M PLUS , L PLUS

Warianty TRADITIONAL SIGVARIS: Palce odkryte

Długości TRADITIONAL SIGVARIS: Krótkie , Długie

Kolory TRADITIONAL SIGVARIS: Beżowy

Mankiet TRADITIONAL SIGVARIS: Mankiet samonośny guzkowy