

Link do produktu: <https://sklep.rena.rzeszow.pl/ponczochy-przeciwyzlakowe-magic-ccl1-sigvaris-p-208.html>



Pończochy przeciwżylakowe MAGIC CCL1 Sigvaris

Cena	376,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Sigvaris

Opis produktu

Pończochy przeciwżylakowe MAGIC CCL1 Sigvaris

Pończochy przeciwżylakowe z lini Magic to najwyższej jakości produkt stosowany w leczeniu żylaków. Produkt jest bardzo elegancki i idealnie dopasowuje się do kształtu nóg.

Pończochy na żylaki cechują się wysoką jakością wykonania i są bardzo łatwe do założenia. Idealnie sprawdzą się u osób, u których występuje uczucie zmęczonych nóg oraz mają niewielkie żylaki. **Pończochy o pierwszym stopniu ucisku** zostały wyposażone w mankiet samonośny **Quadrinova**.



Zalety pończoch przeciwżylakowych Magic CCL 1 Sigvaris

- Wysoka jakość wykonania.
- Łatwe do założenia i zdejmowania.
- Zapewniają komfort i dyskrecję.
- Mankiet samonośny świetnie utrzymuje pończochę na nogach.

Kto powinien nosić pończochy przeciwżylakowe Magic CCL 1 Sigvaris

- Osoby cierpiące na uczucie zmęczonych i ciężkich nóg.

-
- Osoby u których wieczorem pojawiają się obrzęki (żylnych)
 - Żylaki u kobiet po ciąży.
 - Podczas leczenia zakrzepicy i zatorowości.
 - Osoby po operacji żyłaków.



Kto nie powinien nosić pończoch przeciwżylakowych Magic CCL 1 Sigvaris

- Zaawansowane schorzenia tętnic obwodowych (zwężenie, niedrożność)

-
- Zastoinowa niewydolność serca
 - Septyczne (zakażone) zapalenie żył
 - Siniczny obrzęk bolesny
 - Uczulenie na materiał uciskowy
 - Względne: sączące dermatozy, niezgodność materiału uciskowego.

Instrukcja użytkowania i pielęgnacja pończoch uciskowych Magic Sigvaris

- Nie prać w pralce, najlepiej ręcznie w temperaturze do 40 stopni Celsjusza.
- Prać najlepiej w płynie do prania wyrobów uciskowych.
- Nie stosować płynów do zmiękczenia.
- Nie prasować
- Nie czyścić chemicznie.
- Nie suszyć w suszarce.

Zakładanie pończoch uciskowych

Ostre paznokcie i pierścionki z ostrymi krawędziami mogą uszkodzić produkt. Żeby temu zapobiec, przy zakładaniu i zdejmowaniu produktów uciskowych, wskazane jest używanie gumowych rękawic.

Dobór odpowiedniego rozmiaru

Pończochy powinny być dobierane przy kończynach wolnych od brzęku u pacjenta (w pozycji stojącej). Należy pamiętać, aby, ciężar ciała był oparty na kończynie, która jest mierzona. Pamiętajmy, żeby zawsze mierzyć dwie kończyny. Pomiaru najlepiej dokonywać rano zaraz po przebudzeniu. Gdy nogi nie są jeszcze napuchnięte.

OBJAŚNIENIA DO TABELI ROZMIARÓW

cB – obwód mierzony nad kostką w najwęższym miejscu
cC – obwód mierzony w łydce, w najszerszym miejscu
cD – obwód mierzony pod kolaniem, w najwęższym miejscu
cF – obwód mierzony w połowie uda
cG – obwód uda mierzony 5 cm poniżej kroku
IG - długość mierzona od podłoża do wysokości mierzenia obwodu g po stronie wewnętrznej nogi.
Pomiarów należy dokonywać rano, zaraz po przebudzeniu, na nogach wolnych od opuchlizny.

Tabela rozmiarów

SKŁAD SUROWCOWY: 63% poliamid, 37% elastan

Producent:**Sigvaris**

Sklep internetowy Rena gwarantuje zakup pończoch przeciżylakowych w bardzo atrakcyjnych cenach i szybkim czasem realizacji.

Potrzebujesz fachowej pomocy? Zadzwoń do nas [532-462-001](tel:532-462-001) Odpowiemy na wszystkie twoje pytania i pomożemy wybrać odpowiedni produkt.

Szukasz innych podkolanówek ? Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego sklepu, posiadamy produkty takich producentów jak: [Pani Teresa](#), [Sigvaris](#).

Wszystkie oferowane produkty w naszym sklepie są fabrycznie nowe i mają gwarancję producenta.

Na życzenie klienta wystawiamy **paragon** lub fakturę **Vat**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar produktów Magic Sigvaris: XS , S , M , L , XS PLUS , S PLUS , M PLUS , L PLUS

Warianty produktów Magic Sigvari: Zakryte palce

Długość produktów Magic Sigvaris: Krótkie , Średnie , Długie

Kolory produktów Magic Sigvaris: Karmelowy 25 , Czarny 99

Mankiet produktów Magic Sigvaris: Mankiet sam. QUADRINOVA