

Link do produktu: <https://sklep.rena.rzeszow.pl/rajstopy-ciążowe-magic-ccl2-sigvairs-p-213.html>



Rajstopy ciążowe MAGIC CCL2 Sigvairs

Cena	449,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Sigvaris

Opis produktu

Rajstopy dla kobiet w ciąży Magic CCL 2 Sigvaris

Rajstopy ciążowe Magic CCL 2 to wysokiej jakości produkt medyczny przeznaczony **dla kobiet w ciąży** podczas leczenia żylaków. Przy produkcji tych **rajstop uciskowych dla kobiet w ciąży** producent postawił na dwa ważne elementy takie jak: wygląd oraz **komfort podczas noszenia**.

Rajstopy ciążowe z lini Magic idealnie nadają się do codziennego użytkowania oraz mogą być świetnym dopełnieniem eleganckiej stylizacji. Część majtkowa została wzbogacona o efekt push up, którego efektem są uniesione pośladki oraz koryguje sylwetkę. **Mankiet samonośny** Sensinova sprawia, że rajstopy świetnie się trzymają na nogach.

Zalety rajstop ciążowych Magic w drugim stopniu ucisku Sigvaris

- Wysoka jakość wykonania.
- Łatwe do zakładania i zdejmowania.
- Mankiet samonośny sprawia, że rajstopy świetnie się trzymają.
- Dają uczucie komfortu oraz zapewniają dyskrecję.

Kiedy powinno się stosować rajstopy przeciwżylakowe ciążowe w pierwszym stopniu ucisku ?

- Osoby mające lekkie żylaki.
- Uczucie zmęczonych i ciężkich nóg.
- Przy leczeniu zakrzepicy.
- Po operacji żylaków należy nosić od 3 do 6 miesięcy.
- Łagodne żylaki podczas ciąży.
- Podczas podróżowania.

Kto nie powinien nosić rajstop przeciwżylakowych - przeciwwskazania

- Osoby z problemami serca.

-
- Osoby ze schorzeniami tętniczymi.
 - Osoby cierpiące na zapalenie żył.
 - Uczulenie na materiały uciskowe.

Instrukcja użytkowania i pielęgnacja rajstop uciskowych Magic Sigvaris

- Nie prać w pralce, najlepiej ręcznie w temperaturze do 40 stopni Celsjusza.
- Prać najlepiej w płynie do prania wyrobów uciskowych.
- Nie stosować płynów do zmiękczenia.
- Nie prasować
- Nie czyścić chemicznie.
- Nie suszyć w suszarce.

Zakładanie rajstop uciskowych

Ostre paznokcie i pierścionki z ostrymi krawędziami mogą uszkodzić produkt. Żeby temu zapobiec, przy zakładaniu i zdejmowaniu produktów uciskowych, wskazane jest używanie gumowych rękawic.

Dobór odpowiedniego rozmiaru

Rajstopy powinny być dobierane przy kończynach wolnych od brzęku u pacjenta (w pozycji stojącej). Należy pamiętać, aby, ciężar ciała był oparty na kończynie, która jest mierzona. Pamiętajmy, żeby zawsze mierzyć dwie kończyny. Pomiaru najlepiej dokonywać rano zaraz po przebudzeniu. Gdy nogi nie są jeszcze napuchnięte.

OBJAŚNIENIA DO TABELI ROZMIARÓW

cB - obwód mierzony nad kostką w najwęższym miejscu

cC - obwód mierzony w łydce, w najszerszym miejscu

cD - obwód mierzony pod kolaniem, w najwęższym miejscu

cF - obwód mierzony w połowie uda

cG - obwód uda mierzony 5 cm poniżej kroku

cT - obwód pasa

cH - obwód bioder

IG - długość mierzona od podłoża do wysokości mierzenia obwodu g po stronie wewnętrznej nogi.

Pomiarów należy dokonywać rano, zaraz po przebudzeniu, na nogach wolnych od opuchlizny.

[Tabela rozmiarów](#)

Produkt może mieć wydłużony czas oczekiwania. Skontaktuj się ze sklepem aby sprawdzić czas wysyłki.

SKŁAD SUROWCOWY: 63% poliamid, 37% elastan

Producent: **Sigvaris**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar produktów Magic Sigvaris: XS , S , M , L , XS PLUS , S PLUS , M PLUS , L PLUS

Warianty produktów Magic Sigvari: Zakryte palce

Długość produktów Magic Sigvaris: Średnie , Długie

Kolory produktów Magic Sigvaris: Karmelowy 25 , Czarny 99