

Link do produktu: <https://sklep.rena.rzeszow.pl/rajstopy-przeciwyzlakowe-top-fine-select-ccl1-sigvaris-p-219.html>



Rajstopy przeciwżylakowe TOP FINE SELECT CCL1 Sigvaris

Cena	317,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Sigvaris

Opis produktu

Rajstopy przeciwżylakowe TOP FINE SELECT CCL 1 Sigvaris

Rajstopy przeciwżylakowe w I klasie ucisku z linii **Top Fine Select** to wysokiej jakości produkt przeznaczony dla kobiet. Wysoka jakość wykonania sprawia, że **rajstopy dla kobiet** świetnie sprawdzą się podczas codziennego użytkowania. Poprzez dobranie odpowiedniego ucisku rajstopy **top fine select** zapewniają doskonałą terapię uciskową.



Modny wygląd oraz przystępna cena sprawiają, że jest to produkt, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród naszych klientów. **Rajstopy w pierwszym stopniu ucisku** wyprodukowane zostały z najwyższej jakości włókna o doskonałej rozciągliwości. Są bardzo wygodne i łatwe do zakładania oraz zdejmowania.



Zalety rajstop przeciwżylakowych dla kobiet TOP FINE SELECT CCL 1 Sigvairs

- Wysoka jakość wykonania.
- Doskonała terapia uciskowa w przystępnej cenie.
- Modny wygląd sprawia, że rajstopy pasują idealnie pasują do każdej stylizacji.
- Łatwe do zakładania oraz zdejmowania.
- Wysokiej jakości włókna sprawiają, że rajstopy są bardzo rozciągliwe.
- Świetnie dopasowują się do ciała pacjenta oraz zapewniają doskonałą przepuszczalność powietrza.



Stosowanie rajstopy przeciwżylakowych TOP FINE SELECT CCL 1 Sigvaris

- Pacjenci z żylakami lub owrzodzeniami.
- Osoby z uczuciem ciężkich i zmęczonych nóg.
- Niewielkie żylaki z obrzękiem lub bez.
- Kobiety z żylakami po ciąży.
- Leczenie zakrzepicy i zatorowości u pacjentów unieruchomionych.
- Osoby po operacji żylaków (kuracja powinna trwać od 3 do 6 miesięcy)



Przeciwwskazania bezwzględne do stosowania rajstop przeciwżylakowych TOP FINE SELECT CCL 1 Sigvaris

- Osoby ze schorzeniami tętniczymi
- Zastoinowa niewydolność serca.
- Septyczne (zakażone) zapalenie żył.
- Siniczny obrzęk bolesny.
- Względne: sączące dermatozy, niezgodność materiału uciskowego.
- Osoby z uczuleniem na wyroby uciskowe.

Skład surowcowy rajstop Top Fine Select Sigvaris

- 62% Poliamid

-
- 38% Elastan

Zakładanie rajstop uciskowych

Ostre paznokcie i pierścionki z ostrymi krawędziami mogą uszkodzić produkt. Żeby temu zapobiec, przy zakładaniu i zdejmowaniu produktów uciskowych, wskazane jest używanie gumowych rękawic.

Dobór odpowiedniego rozmiaru

Rajstopy przeciwżylakowe powinny być dobierane przy kończynach wolnych od brzęku u pacjenta (w pozycji stojącej). Należy pamiętać, aby, ciężar ciała był oparty na kończynie, która jest mierzona. Pamiętajmy, żeby zawsze mierzyć dwie kończyny. Pomiaru najlepiej dokonywać rano zaraz po przebudzeniu. Gdy nogi nie są jeszcze napuchnięte.

OBJAŚNIENIA DO TABELI ROZMIARÓW

cB - obwód mierzony nad kostką w najwęższym miejscu

cC - obwód mierzony w łydce, w najszerszym miejscu

cD - obwód mierzony pod kolaniem, w najwęższym miejscu

cF - obwód mierzony w połowie uda

cG - obwód uda mierzony 5 cm poniżej kroku

cT - obwód pasa

cH - obwód bioder

IG - długość mierzona od podłoża do wysokości mierzenia obwodu g po stronie wewnętrznej nogi.

[Tabela rozmiarów](#)

Producent: Sigvaris

Sklep internetowy Rena gwarantuje zakup rajstop przeciwżylakowych w bardzo atrakcyjnych cenach i szybkim czasem realizacji.

Potrzebujesz fachowej pomocy? Zadzwoń do nas [532-462-001](tel:532-462-001) Odpowiemy na wszystkie twoje pytania i pomożemy wybrać odpowiedni produkt.

Szukasz innych pończoch ? Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego sklepu, posiadamy produkty takich producentów jak: [Pani Teresa](#), [Sigvaris](#).

Wszystkie oferowane produkty w naszym sklepie są fabrycznie nowe i mają gwarancję producenta.

Na życzenie klienta wystawiamy **paragon** lub fakturę **Vat**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Warianty TOP FINE SELECT: Zakryte palce

Długości TOP FINE SELECT: Krótkie , Długie

Kolory TOP FINE SELECT: Cielisty , Czarny

Rozmiary TOP FINE SELECT: S , M , L , S PLUS , M PLUS , L PLUS