

Link do produktu: <https://sklep.rena.rzeszow.pl/rajstopy-uciskowe-magic-ccl1-sigvaris-p-210.html>



Rajstopy uciskowe MAGIC CCL1 Sigvaris

Cena	418,45 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Sigvaris

Opis produktu

Rajstopy uciskowe MAGIC CCL1 Sigvaris

Rajstopy uciskowe z lini Magic CCL 1 firmy Sigvaris to produkt przeznaczony wyłącznie dla kobiet. Produkt cechuje się wysoką jakością wykonania. Idealnie sprawdzą się podczas codziennego użytkowania oraz mogą być świetnym uzupełnieniem eleganckiej stylizacji.

Rajstopy przeciwżylakowe dla kobiet idealnie dopasowują się nóg pacjenta, część majtkowa z efektem push up koryguje sylwetkę oraz podnosi pośladki. Rajstopy zostały wyposażone w mankiet samonośny **Sensinova**.



Zalety rajstop Magic o pierwszym stopniu ucisku Sigvaris

- Wysoka jakość wykonania.
- Łatwe do zakładania i zdejmowania.
- Mankiet samonośny sprawia, że rajstopy świetnie się trzymają.
- Dają uczucie komfortu oraz zapewniają dyskrecję.



Kiedy powinno się stosować rajstopy przeciwżylakowe w pierwszym stopniu ucisku ?

-
- Osoby mające żylaki oraz u pacjentów z ryzykiem.
 - Uczucie zmęczonych i ciężkich nóg.
 - Przy leczeniu zakrzepicy.
 - Po operacji żyłaków należy nosić od 3 do 6 miesięcy.
 - Łagodne żylaki podczas ciąży.
 - Podczas podróży.

Kto nie powinien nosić rajstop przeciwżylakowych - przeciwwskazania

- Osoby z problemami serca.
- Osoby ze schorzeniami tętniczymi.
- Osoby cierpiące na zapalenie żył.
- Uczulenie na materiały uciskowe.

Instrukcja użytkowania i pielęgnacja rajstop uciskowych Magic Sigvaris

- Nie prać w pralce, najlepiej ręcznie w temperaturze do 40 stopni Celsjusza.
- Prać najlepiej w płynie do prania wyrobów uciskowych.
- Nie stosować płynów do zmiękczenia.
- Nie prasować
- Nie czyścić chemicznie.
- Nie suszyć w suszarce.

Zakładanie rajstop uciskowych

Ostre paznokcie i pierścionki z ostrymi krawędziami mogą uszkodzić produkt. Żeby temu zapobiec, przy zakładaniu i zdejmowaniu produktów uciskowych, wskazane jest używanie gumowych rękawic.

Dobór odpowiedniego rozmiaru

Rajstopy powinny być dobierane przy kończynach wolnych od brzęku u pacjenta (w pozycji stojącej). Należy pamiętać, aby, ciężar ciała był oparty na kończynie, która jest mierzona. Pamiętajmy, żeby zawsze mierzyć dwie kończyny. Pomiaru najlepiej dokonywać rano zaraz po przebudzeniu. Gdy nogi nie są jeszcze napuchnięte.

OBJAŚNIENIA DO TABELI ROZMIARÓW

cB - obwód mierzony nad kostką w najwęższym miejscu
cC - obwód mierzony w łydce, w najszerszym miejscu
cD - obwód mierzony pod kolanem, w najwęższym miejscu
cF - obwód mierzony w połowie uda
cG - obwód uda mierzony 5 cm poniżej kroku
cT - obwód pasa
cH - obwód bioder
IG - długość mierzona od podłoża do wysokości mierzenia obwodu g po stronie wewnętrznej nogi.
Pomiarów należy dokonywać rano, zaraz po przebudzeniu, na nogach wolnych od opuchlizny.

Tabela rozmiarów

Producent: **Sigvaris**

Sklep internetowy Rena gwarantuje zakup rajstop przeciwżylakowych w bardzo atrakcyjnych cenach i szybkim czasem realizacji.

Potrzebujesz fachowej pomocy? Zadzwoń do nas [532-462-001](tel:532-462-001) Odpowiemy na wszystkie twoje pytania i pomożemy wybrać odpowiedni produkt.

Szukasz innych podkolanówek ? Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego sklepu, posiadamy produkty takich producentów jak: [Pani Teresa](#), [Sigvaris](#).

Wszystkie oferowane produkty w naszym sklepie są fabrycznie nowe i mają gwarancję producenta.

Na życzenie klienta wystawiamy **paragon** lub fakturę **Vat**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar produktów Magic Sigvaris: XS , S , M , L , XS PLUS , S PLUS , M PLUS , L PLUS

Warianty produktów Magic Sigvari: Zakryte palce

Długość produktów Magic Sigvaris: Średnie , Długie

Kolory produktów Magic Sigvaris: Karmelowy 25 , Czarny 99