

Link do produktu: <https://sklep.rena.rzeszow.pl/temblak-na-reke-pani-teresa-p-299.html>



Temblak na rękę Pani Teresa

Cena	32,29 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	PT 0204A
Producent	Pani Teresa

Opis produktu

Temblak na rękę Pani Teresa jest sprzętem medycznym. Ma na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań pooperacyjnych. Może być wykorzystywany w procesach rehabilitacji w celu szybszego powrotu do zdrowia.

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- **temblak kończyny górnej** stosowany jako opatrunek podtrzymujący opatrunek gipsowy
- **orteza** może być używana po zdjęciu opatrunku gipsowego – podczas rehabilitacji
- **temblak** służy jako opatrunek doraźny w przypadku złamania kości przedramienia lub zwknięcia stawu łokciowego

Tabela rozmiarów

Rozmiar	XXS	XS	S	M	L
Obwód klatki piersiowej cm		50 - 60	61 - 75	76 - 91	92 - 107

Instrukcja używania:

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru **temblaka** należy dokonać pomiaru obwodu klatki piersiowej, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

Sposób zakładania:

Przedramię umieścić w kieszeni temblaka, kciuk zawiesić w przeznaczonym do tego „oczku” w wewnętrznej części temblaka. Taśmę przełożyć przez zdrowe ramię dopasowując odpowiednio jej długość za pomocą rzepów.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie prasować! Nie chlorować!

Uwagi:

Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.

Producent: **Pani Teresa**

Numer katalogowy: **PT0204A**

Produkt jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Deklaracja Zgodności CE wytwórcy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiary produktów Pani Teresa : S , XS , XXS , M , L , XL