

Link do produktu: <https://sklep.rena.rzeszow.pl/usztywniacz-nadgarstka-pani-teresa-p-273.html>



Usztywniacz nadgarstka Pani Teresa

Cena	20,45 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	PT 0306
Producent	Pani Teresa

Opis produktu

Usztywniacz nadgarstka Pani Teresa to produkt ortopedyczny wzmacnia i stabilizuje staw nadgarstkowy oraz zapobiega nadwyrężeniom i naciągnięciom.

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- **Opaska stawu nadgarstkowego** wzmacnia aparat więzadłowy nadgarstka
- **Elastyczna opaska stawu nadgarstkowego** łagodzi ból i obrzęki

Tabela rozmiarów

Rozmiar	S	M	L
Obwód ręki w nadgarstku cm	14 - 18	19 - 22	23 - 25

Instrukcja używania:

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu ręki w nadgarstku, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

Sposób zakładania:

- W opakowaniu znajdują się dwie opaski.
- Opaski zapiąć na wysokości stawów nadgarstkowych.
- Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie prasować! Nie chlorować!

Uwagi:

- Stosowanie opaski należy skonsultować z lekarzem.
- W czasie noszenia opaski zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie opaski bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni.

Producent: **Pani Teresa**

Numer katalogowy: **PT0306**

Produkt jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Deklaracja Zgodności CE wytwórcy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiary produktów Pani Teresa : S , M , L